

# Cannule Buratto/Orciuolo



Cannule Buratto-Orciuolo per l'aspirazione dei residui corticali nella cataratta. Da usare in unione ad opportuna macchina per infusione aspirazione oculare.



MMD-143

  
**micromed**

## USO

Collegare i connettori posteriori della cannula alle relative vie di aspirazione ed infusione della macchina.

La via di aspirazione è rossa mentre quella di infusione è azzurra. [Cod. Micromed CCD-01]. Inserire le punte in un contenitore pieno di soluzione fisiologica e far fluire il liquido aspirando fino al completo riempimento.

## AVVERTENZE

Non mandare acqua in uscita dalla porta di aspirazione se non si è sicuri che i residui siano tutti sciolti ed asportati, pena l'otturazione della porta di aspirazione.

Si consiglia (almeno la prima volta)

Controllare che la linea di aspirazione con la cannula inserita non induca un vuoto maggiore di 50-100 mmHg con flusso di 25 cc/min. In caso contrario pulire la punta, lavarla e se l'inconveniente sussiste contattare l'assistenza.

Controllare che il flusso dalla linea di infusione sia robusto, continuo e ben cilindrico. Se l'acqua diffonde o spruzza dal foro revisionare la punta

di lavare in acqua distillata calda: Soffiare con aria e far fluire con l'aiuto di una siringa l'acqua attraverso le punte prima e dopo la sterilizzazione. Sterilizzare in autoclave solo se le cannule sono ben pulite.

lavarla e se l'inconveniente sussiste contattare l'assistenza.

## MANUTENZIONE

Dopo l'uso, aspirare con una siringa almeno 100cc di acqua distillata attraverso la porta di aspirazione.

Le cannule vanno lavate con acqua distillata ripetutamente fino ad essere sicuri di aver tolto tutti i residui di cataratta.



**Classificazione**

*Dispositivo medico di classe I*

Prodotto e distribuito da:  
**MICROMED s.r.l.**

Via G. Oberdan, 21 - 00013 Fonte Nuova (RM)

Rev 1.2 - 27.05.2019