


Cannule di Buratto-Orciuolo

Rev 2.0 - 29.05.2019

Cannule a due mani per l'aspirazione dei residui corticali nella chirurgia FACO ed ECCE.

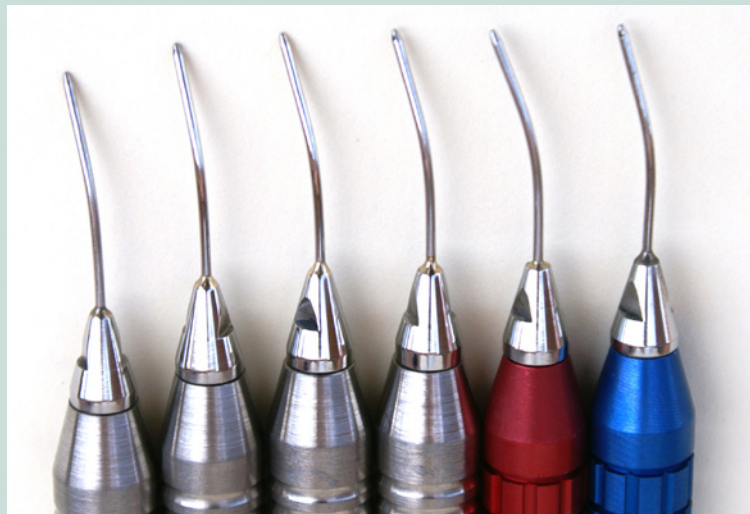

Le Cannule Buratto-Orciuolo sono utilizzate per l'aspirazione dei residui corticali nella chirurgia FACO ed ECCE.

Sono sempre fornite in coppia per l'aspirazione bimanuale dei residui corticali dopo la facoemulsificazione del nucleo. Il loro utilizzo è previsto attraverso il tunnel corneale ed in questo modo consentono di raggiungere tutti i punti del sacco così da permettere una completa rimozione dei residui.

MICROMED produce e commercializza questi dispositivi medici specializzati, secondo differenti modalità di configurazione e con punte lisce o sabbiate per favorire, in questo modo, le diverse esperienze e necessità operative dei chirurghi utilizzatori.

Per il loro corretto utilizzo è necessario collegare i connettori posteriori della cannula alle relative vie di aspirazione e infusione della macchina, tenendo conto che la via di aspirazione è identificata dal colore rosso mentre quella di infusione dal colore azzurro.

Si consiglia, almeno la prima volta, di lavare il dispositivo in acqua distillata calda, soffiare con aria e far fluire con l'aiuto di una siringa l'acqua attraverso le punte prima e dopo la sterilizzazione.

Si raccomanda di procedere con la sterilizzazione in autoclave, solo se le cannule sono ben pulite.



LINEA PRODOTTI E CODICI

CODICE	DESCRIZIONE
MMD-143	Coppia cannule Buratto-Orciuolo
MMD-146	Coppia cannule Buratto-Orciuolo in titanio
MMD-153	Punta di ricambio per MMD-143
MMD-147	Punta di ricambio per MMD-146